

# Strep A Test Kit

Test rapido immunocromatografico certificato per autoanalisi da utilizzare come test qualitativo di screening per l'individuazione di antigeni streptococchi del gruppo A da campioni di tampone faringeo.



**Facile da usare**



**Certificato CE Self-test**



**Test rapido qualitativo**



**Controlli inclusi nel kit**



**Distribuito da**




**TECO SRL**

Via Prof. Filippo Manna 27  
Casalnuovo di Napoli (NA), presso il c/o Millefiori


## Procedura di Test

### 1 Raccolta del campione

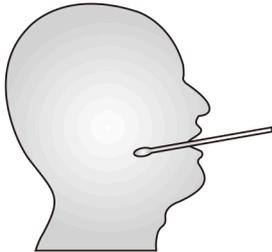


### 2 Step 1

Aggiungere 4 gocce      Aggiungere 4 gocce

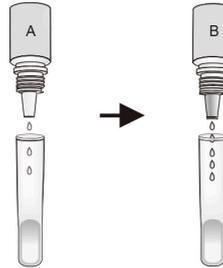


### 3 Step 2

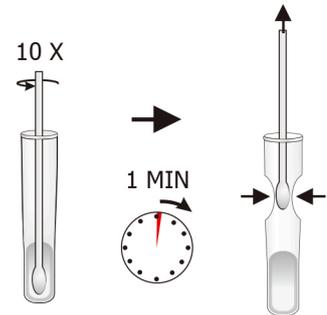


### 4 Step 3



### 5 Step 4

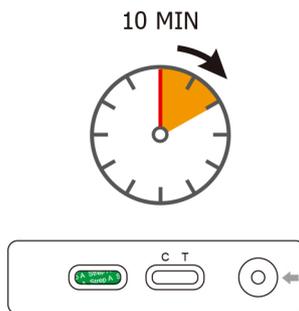

### 6 Risultati

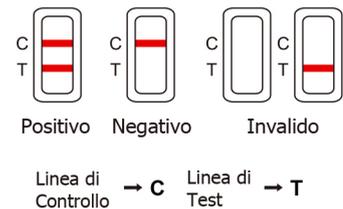

## Caratteristiche del Test

		One Step Strep A Swab Test		
		+	-	Totali
Metodo di coltura classico	+	111	3	114
	-	4	261	265
	Totali	115	265	379

Sensibilità:  $111/114 \times 100\% = 97.4\%$ ; Specificità:  $261/265 \times 100\% = 98.5\%$

## Informazioni prodotto

Codice	Descrizione
W39-C	One Step Strep A Swab Test

FDA / CE 0123